

Link do produktu: <https://www.kozlik-golebie.pl/strzykawka-automatyczna-simcro-premium-0-5ml-vet-animal-p-1625.html>



Strzykawka Automatyczna Simcro Premium 0,5ml Vet Animal

Cena

158,00 zł

Producent

Centrum Zdrowia Gołębi

Opis produktu

Strzykawka Automatyczna Simcro Premium 0,5ml - Vet Animal (Z aplikatorem na butelkę do użytku profesjonalnego)

OPIS PRODUKTU

- Łatwość użycia oraz dokładność dawkowania nawet przy małych objętościach.
- Wygodne pokrętko umożliwiające ustawienie dawki – z możliwością regulacji w zakresie od 0,05 ml do 0,5 ml (co 0,05 ml).
- Ergonomiczna konstrukcja i wygodny uchwyt zapewniają mniejszą rozpiętość dłoni, gwarantując mniejsze zmęczenie – zwłaszcza podczas wykonywania serii szczepień.
- Specjalna konstrukcja umożliwia łatwe usuwanie pęcherzyków powietrza z cylindra, zwiększając precyzjność dawkowania.
- Ulepszona konfiguracja zaworu zapewnia dokładne napełnianie i precyzyjną aplikację zadanej dawki.
- Możliwość gotowania cylindra w wodzie zapewnia czystość i sterylność po użyciu.
- Złącze Luer-Lock umożliwia dopasowanie wszystkich dostępnych na rynku igieł.
- W zestawie z dwiema igłami metalowymi oraz trzema zapasowymi uszczelkami.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

STOSOWANIE

1. W celu nastawienia odpowiedniej dawki, ściśnij uchwyty, a następnie obróć pokrętko nastawienia na żądaną dawkę.
2. W butelce ze szczepionką dokonaj nakłucia wstępnego jałową igłą do wstrzyknięć podskórnych, a następnie zutylizuj igłę w bezpieczny sposób w celu uniknięcia zanieczyszczeń.
3. Umieść butelkę w aplikatorze w taki sposób, aby kolec aplikatora przeszedł przez wcześniej wykonane nakłucie.
4. Poluzuj osłonę butelki, dociśnij a następnie przekręć butelkę w osłonie, aby uszczelnić układ.
5. Umieść nasadkę igły w złączu Luer-Lock, a następnie przekręć ją zgodnie ze wskazówkami zegara.
6. Nie zdejmuj osłonki igły do momentu, aż cylinder będzie gotowy do napełnienia.

NAPEŁNIANIE

1. Pochyl strzykawkę pod kątem ok. 45°, ściśnij uchwyty i napełniaj cylinder tak długo, aż zostaną usunięte wszystkie pęcherzyki powietrza.
2. Strzykawka jest gotowa do użycia.

CZYSZCZENIE

1. Zanim przystąpisz do czyszczenia automatu, igłę oraz pozostałą w cylindrze część szczepionki usuń do oddzielnego naczynia przeznaczonego na odpady.
2. Wymieszaj ciepłą wodę z detergentem.
3. Zanurz urządzenie w wodzie z detergentem, a następnie kilkakrotnie i energicznie ściśnij uchwyty by przepłukać automat.
4. Powtórz czynność w czystej ciepłej wodzie bez detergentu.
5. Rozkręć automat i jeszcze raz przepłucz wszystkie elementy w ciepłej wodzie.

STERYLIZACJA

-
1. Wyjmij uszczelkę z cylindra.
 2. Umieść cylinder w gotującej się w wodzie na 5 minut.
 3. Po upływie 5 minut umieść wszystkie elementy automatu na suchej i czystej powierzchni (np. na ręczniku) i odczekaj do wyschnięcia układu.